



Mode d'emploi

Vous venez d'acquérir une Lexilens[®], nous vous remercions pour votre achat.

Nous espérons que votre Lexilens[®] vous apportera entière satisfaction.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à consacrer le temps qu'il faut au premier réglage de votre Lexilens[®].

Un réglage initial de qualité vous assurera de profiter pleinement de votre Lexilens[®]

Bonne lecture

CONTENU DE LA BOITE

- La Lexilens[®]
- Etui
- Essuie-verre
- Cordon USB
- Guide de démarrage

APPLICATION SMARTPHONE

L'installation de l'application Lexilens à partir de l'Android store ou de l'Apple store est nécessaire pour le réglage de la Lexilens[®] lors de la première utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

La Lexilens[®] est indiquée chez les personnes atteintes de troubles de la lecture.

- Ne pas démonter la Lexilens[®] pour quelque raison que ce soit.
- Ne pas nettoyer la Lexilens[®] sous l'eau ni la laisser à proximité de sources de chaleur (radiateurs, fours, feu).
- Garder la Lexilens[®] hors de portée des enfants de moins de 5 ans. L'utilisation de la Lexilens doit être faite sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas utiliser la Lexilens[®] comme protection solaire, elle ne protège pas des rayons UV nocifs du soleil.
- Ne pas utiliser la Lexilens[®] en milieu humide (salle de bain, baignoire, ...).

EFFETS INDESIRABLES ET CONTRE-INDICATIONS

- Epilepsie : Ne pas utiliser si sujet à l'épilepsie : la Lexilens® peut provoquer des crises d'épilepsie pour les personnes photosensibles.
- Utilisation prolongée : L'utilisation prolongée (au-delà d'une heure) pourrait causer des maux de tête, des nausées, des vertiges. Il est recommandé de limiter l'utilisation à une heure, ou de faire une pause toutes les heures.
- Pathologie oculaire : Ne pas utiliser la Lexilens® sans consultation préalable si l'utilisateur a une pathologie oculaire connue (strabisme, amblyopie, ...) Il est recommandé de consulter un ophtalmologiste en cas de doute.

MISE EN GARDE



Si la Lexilens® est portée dans une pièce équipée d'un éclairage néon, les verres de la monture clignoteront d'une manière visible et désagréable. Privilégiez un autre éclairage, comme par exemple la lumière du jour, ou des ampoules LED. Un clignotement visible ou anormal des verres de la Lexilens® pourrait causer des maux de tête, des vertiges ou des crises d'épilepsies. En cas de clignotement visible et anormal des verres de la Lexilens® sous une source de lumière sans scintillement (lumière du jour, LED), contactez votre revendeur ou le support d'ABEYE.

CONSIGNES POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS

La Lexilens® est un déchet électrique et électronique (DEEE), ne la jetez pas dans votre poubelle ménagère mais dans un lieu de collecte spécifique désigné par les autorités locales.




DECLARATION DE CONFORMITE

La société ABEYE déclare que la Lexilens® est conforme aux exigences des directives européennes 93/42/CEE et 2007/47/CEE concernant la mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I. La déclaration de conformité complète du produit est disponible sur demande à la société ABEYE.



DESCRIPTION DE LA LEXILENS®

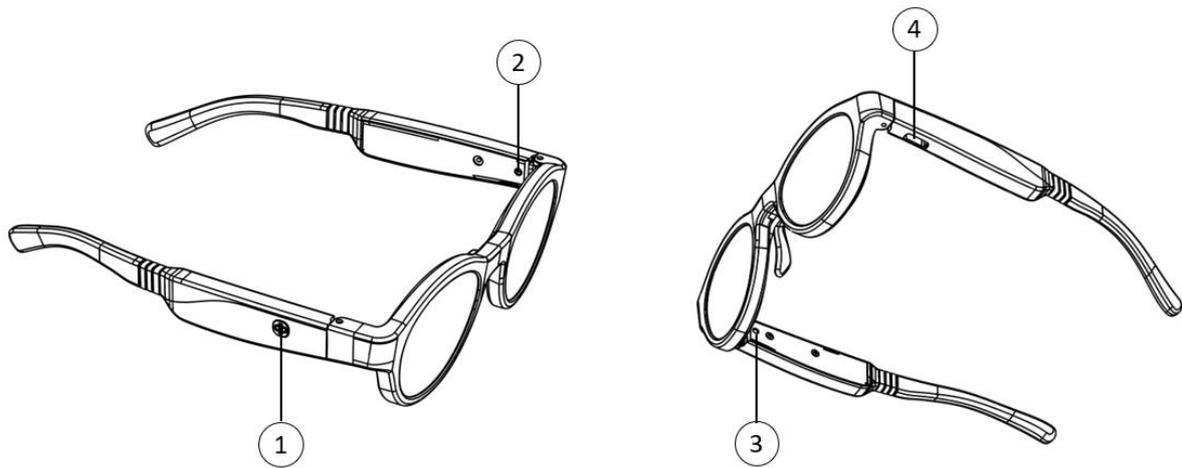


- ① Bouton ON/OFF/Bluetooth®
- ② Indicateur lumineux (LED) de recharge batterie
- ③ Indicateur lumineux (LED) ON/OFF/Bluetooth®
- ④ Prise de recharge USB-C

FONCTIONNEMENT

La Lexilens® filtre la lumière pour améliorer la qualité de lecture des personnes dyslexiques en détachant et démêlant les lettres, les mots, les lignes.

Lorsque la Lexilens® est réglée correctement pour l'utilisateur, une lecture plus rapide, une meilleure compréhension des textes, avec moins d'effort sont obtenus dans la plupart des cas


ALLUMER / ETEINDRE LA LEXILENS©

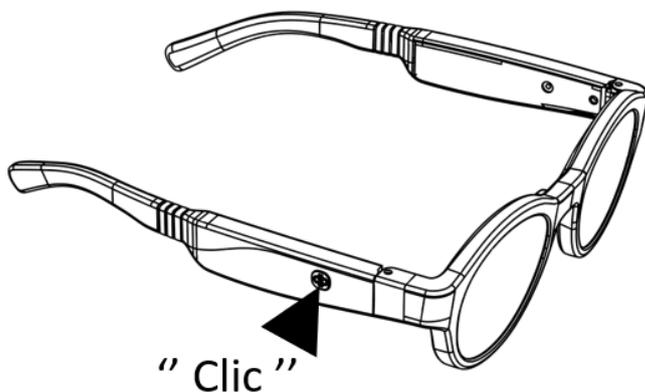

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Les verres de la LEXILENS© deviennent opaques. La LED s'allume vert pendant 5 secondes si la batterie est suffisamment chargée, ou clignote rouge si la batterie doit être rechargée.


Remarque : la Lexilens® s'éteint automatiquement au bout de 1 heure de fonctionnement continu. Il est recommandé de faire une pause avant d'utiliser à nouveau la Lexilens®.

RECHARGER LA BATTERIE

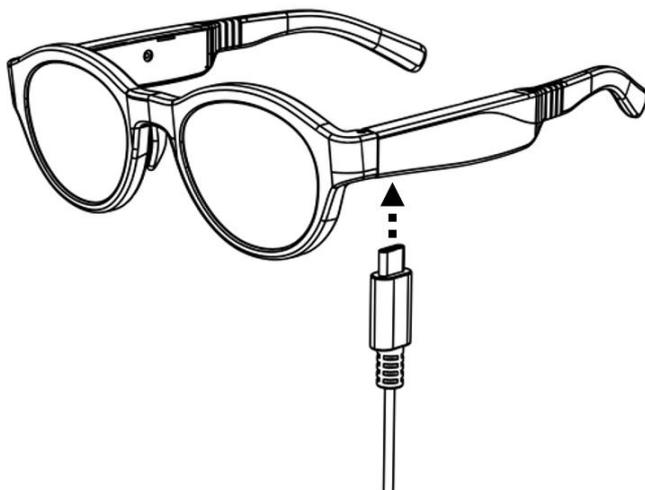

La LED de la branche gauche est orange si la batterie est en charge et devient verte quand la batterie est suffisamment chargée.

ACTIVER LE BLUETOOTH®

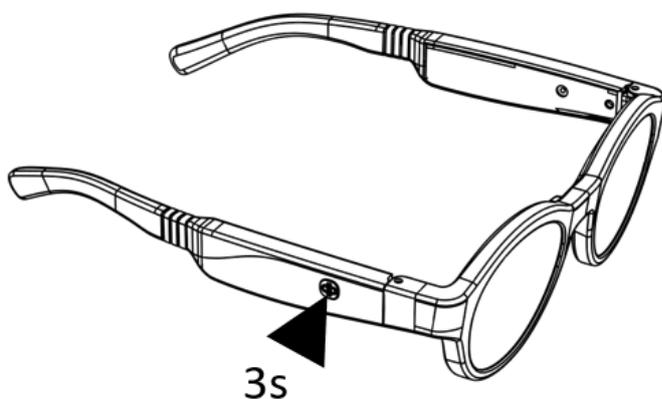

Restez appuyé pendant 3 secondes sur le bouton ON/OFF. Le Bluetooth® s'active quand la LED de la branche droite clignote en bleu. La LED devient bleu fixe quand la Lexilens® est connectée à votre application smartphone.

Remarque : le Bluetooth® se désactive automatiquement au bout de 5 minutes.

REGLAGE DE LA MONTURE LEXILENS®

MODIFIER LE REGLAGE DE LA MONTURE EST NECESSAIRE POUR ADAPTER LA LEXILENS® A CHAQUE UTILISATEUR.

Pour les enfants, il est conseillé de changer les réglages de la Lexilens® en présence d'un adulte.

1 - Installer l'application smartphone Lexilens® (Disponible sur Android Store et Apple Store)

2 - Connecter la Lexilens® à l'application

3 - Lire un texte avec différents réglages « vitesse » pour trouver le réglage qui facilite le plus votre lecture.

4 - La Lexilens® garde les paramètres en mémoire : il n'est pas nécessaire de répéter l'opération de réglage à chaque utilisation.

5 - Une fois les paramètres enregistrés dans l'application, l'utilisation de la Lexilens® ne requiert pas de téléphone

Paramètres avancés : Après avoir trouvé votre réglage « vitesse » optimal, vous pouvez modifier le réglage « balance » pour faire varier l'opacité du verre, et le réglage « boost » pour optimiser plus finement votre lecture.

ASSISTANCE ET SERVICE APRES-VENTE

Si votre Lexilens® s'allume rouge fixe (LED branche droite), ou si les verres ne se teintent plus lors de la mise en marche, restez appuyé pendant 15 secondes sur le bouton ON/OFF.

Pour tout autre problème technique, consultez les questions fréquemment posées (FAQ) sur le site web Lexilens.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur Lexilens pour effectuer une demande de réparation ou de remplacement selon les termes de la garantie. (En France, contactez votre opticien ATOL ou directement le service après-vente d'ATOL au 0 805 382 225.)

ENTRETIEN

Utilisez un tissu en microfibres (fourni avec votre Lexilens®) pour nettoyer les verres. Nettoyez la Lexilens uniquement à sec, sans ajout d'eau ou d'autres liquides.



Ne jamais nettoyer avec de l'eau, ni vaporiser directement la Lexilens, ni ouvrir la Lexilens®.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, du démontage du produit ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.

ATOL reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

ETIQUETTE

L'étiquetage de la Lexilens® est composé de différents logo dont voici la signification :

	Marquage CE		Fabriquant
	Marquage FCC		Date de fabrication
	Marquage IC		Tenir à l'abri de l'humidité
	Référence commerciale		Limite de température
	Numéro de série (étiquette). Notez le ici pour le conserver:		Limite d'humidité
	Numéro de lot		Limite de pression
	Lire attentivement la notice		Bluetooth®
	DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Electronique)		Pièce appliquée de type BF

Mise sur le marché de la monture Lexilens® : 2020-12

Dernière révision du mode d'emploi : 2021 – 09

Les lunettes sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans le guide de démarrage qui accompagne le dispositif médical et à vous rapprocher de votre opticien pour toute information complémentaire. Dépliant 09.20